

## Opuscolo informativo per il paziente

CERAMENT G

### Che cos'è CERAMENT G?

CERAMENT G è un sostituto per innesto osseo sintetico contenente solfato di calcio (60%), idrossiapatite (40%), cloruro di sodio (5 mg per mL di pasta) e gentamicina solfato. CERAMENT G eroga 17,5 mg di gentamicina per ogni mL di pasta.

### In quali casi viene utilizzato CERAMENT G?

CERAMENT G viene utilizzato per i pazienti che presentano un vuoto o un difetto osseo, al fine di riempire tale vuoto o difetto per supportare il processo di guarigione dell'osso e prevenire infezioni.

### Come funziona CERAMENT G?

CERAMENT G viene riassorbito e rimodellato in nuovo osso con il passare del tempo, entro i 6-12 mesi successivi all'impianto. La gentamicina contribuisce a prevenire la colonizzazione.

### Sono necessari follow-up o monitoraggi speciali per i pazienti su cui è stato impiantato CERAMENT G?

Non sono necessari ulteriori trattamenti chirurgici o monitoraggi: dopo l'intervento chirurgico, il paziente verrà sottoposto ai follow-up di routine.

### La gentamicina contenuta nel CERAMENT G significa che il paziente non deve assumere antibiotici a parte?

No. Se al paziente sono stati prescritti antibiotici dopo l'intervento chirurgico, è necessario assumerli in quanto la gentamicina contenuta nel CERAMENT G non sostituisce la necessità di assumere antibiotici per via orale o endovenosa.

### Effetti avversi

L'impianto di CERAMENT G comporta gli stessi rischi associati ad ogni intervento chirurgico, quali ad esempio infezioni, dolore, lividi, gonfiori e sanguinamento nel sito dell'intervento.

Se CERAMENT G è stato utilizzato in prossimità di un'articolazione, ciò potrebbe provocare un'infiammazione (arrossamento, gonfiore, dolore) dell'articolazione stessa.

All'interno del tessuto molle, CERAMENT G può provocare una reazione infiammatoria (arrossamento, gonfiore, dolore).

In rari casi, CERAMENT G può provocare una fuoriuscita di liquido o fluido, di colore bianco, dalla ferita: nella maggior parte dei casi, questo "drenaggio bianco dalla ferita" si risolve entro due-tre settimane senza ulteriori trattamenti. Consultare un medico se si verifica uno qualsiasi di questi sintomi.

### Il paziente utilizza altri farmaci?

Se il paziente sta utilizzando, ha utilizzato di recente o potrebbe utilizzare qualsiasi altro farmaco, deve informare il chirurgo.



BONESUPPORT AB  
Scheelevägen 19  
IDEON Science Park  
SE-223 70 Lund, Sweden

A0579-01 rev 03 it